

Instrukcja diagnozy usterek Nebulizatora Air Pro


Drogi Użytkowniku,

Jeśli zaobserwujesz nieprawidłowe działanie swojego nebulizatora Air Pro i chciałbyś skorzystać z udzielonej przez nas gwarancji lub rękojmi za wady fizyczne zapoznaj się z poniższymi krokami. Ich wykonanie pozwoli przyśpieszyć proces przywrócenia pełnej funkcjonalności Twojego Air Pro!

Serdecznie pozdrawiamy,
Zespół healthin.com!



Elementy nebulizatora:

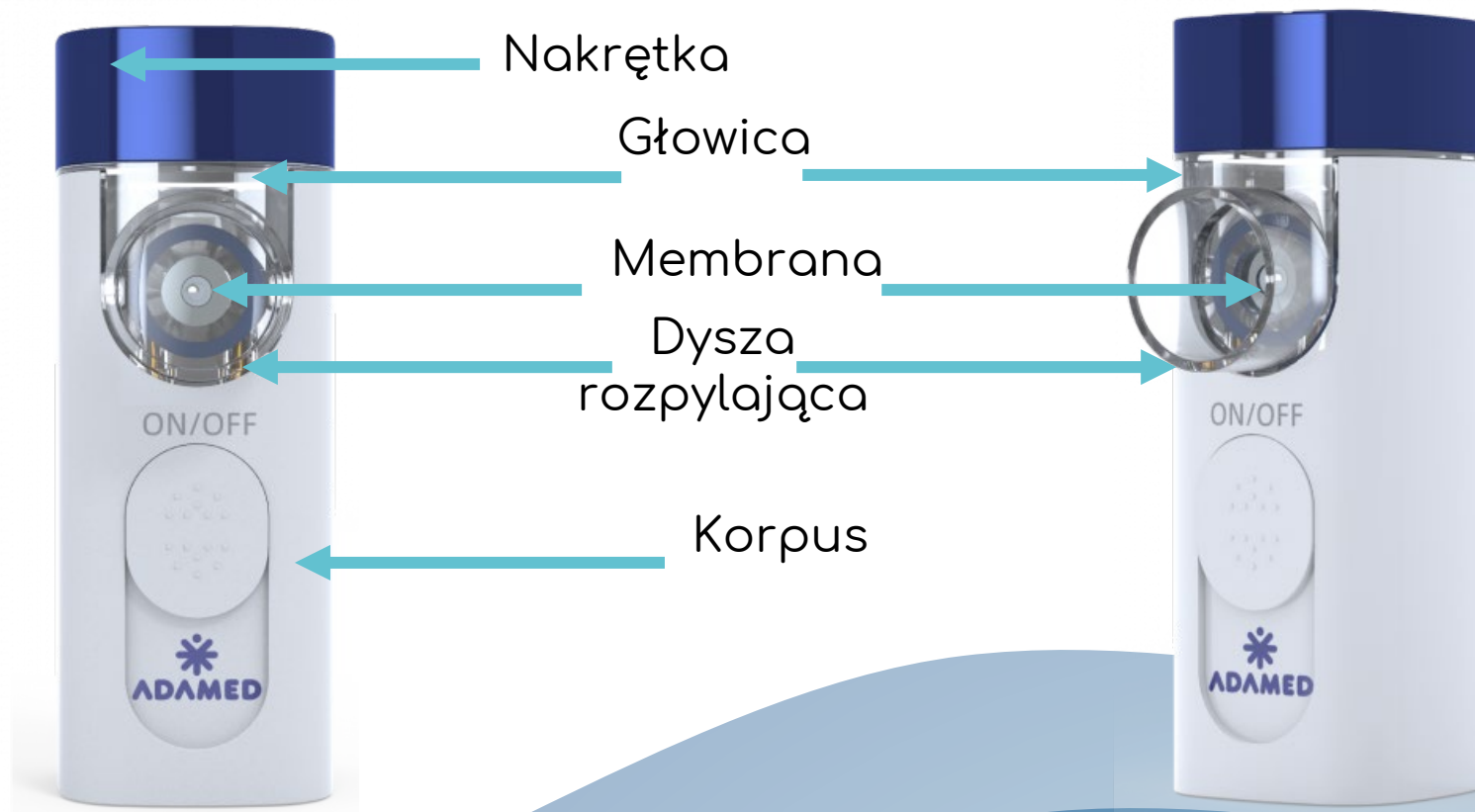

Przeprowadź wstępną diagnozę usterki przechodząc po kolei następujące kroki:

1

Upewnij się, że Nebulizator jest w pełni naładowany (po podłączeniu przewodu USB do adaptera sieciowego umieszczonego w gnieździe sieciowym, kontrolka „power” powinna świecić zielonym światłem ciągłym).







Przeprowadź poprawny proces czyszczenia membrany w głowicy rozpylającej wg poniższej instrukcji:

2

1. Do pojemnika na lek wlej 3-6 ml wody (najlepiej przegotowanej o temperaturze nie wyższej niż 40°C);
2. Dodaj od 2-5 kropli białego octu (spirytusowego);
3. Zamknij pojemnik na lek i kilkakrotnie wstrząśnij urządzeniem z roztworem w pojemniku na lek (górze/dół oraz na boki);
4. Przeprowadź proces pełnej nebulizacji (nie wdychaj oparów wydobywających się z nebulizatora);
5. W celu dezynfekcji przetrzyj powierzchnię głowicy alkoholem 75% lub środkiem medycznego przeznaczenia. Do tej czynności użyj czystej gazy medycznej;

! Nie dotykaj metalowej membrany, gdyż grozi to uszkodzeniem mechanicznym!

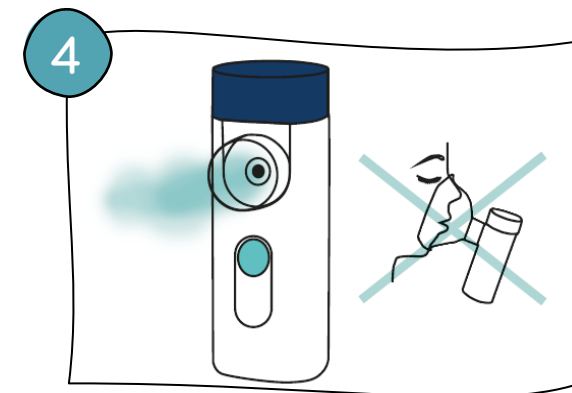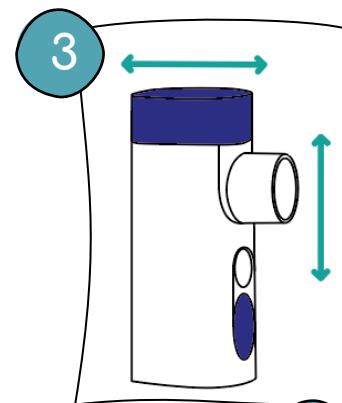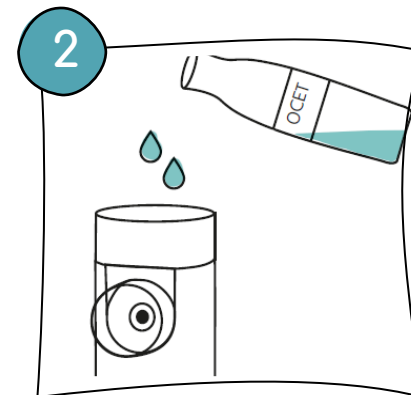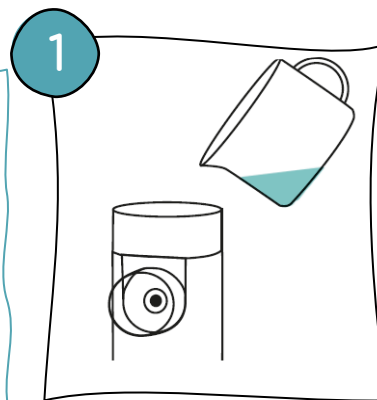


3


Sprawdź piny w Nebulizatorze oraz w głowicy rozpylającej, które powinny być czyste i wolne od wszelkich nalotów, aby utrzymać przewodzenie napięcia pomiędzy elementami nebulizatora

Głowica

Model 2018

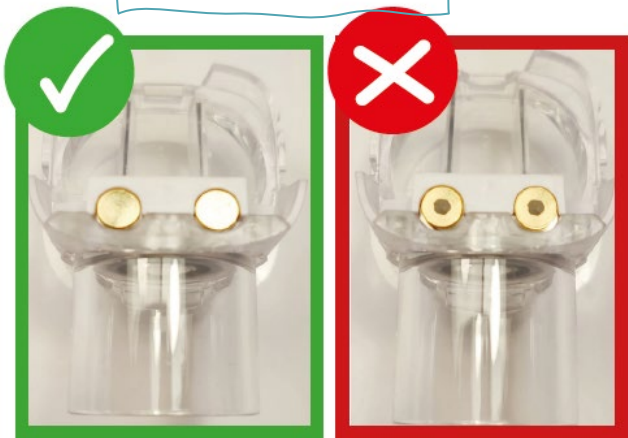

Model 2019

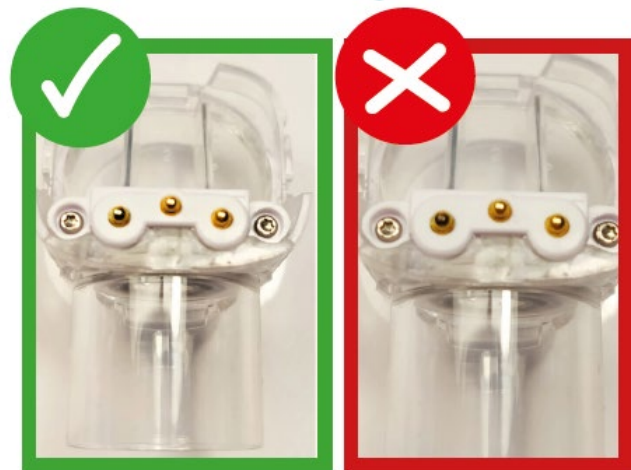

Korpus

Model 2018





Model 2019



4

Jeśli są zabrudzone – wykonaj procedurę czyszczenia z użyciem ostrego narzędzia, np.: niewielkich rozmiarów śrubokręta lub pilniczka do paznokci i gazy nasączonej alkoholem wysokoprocentowym (spirytus).

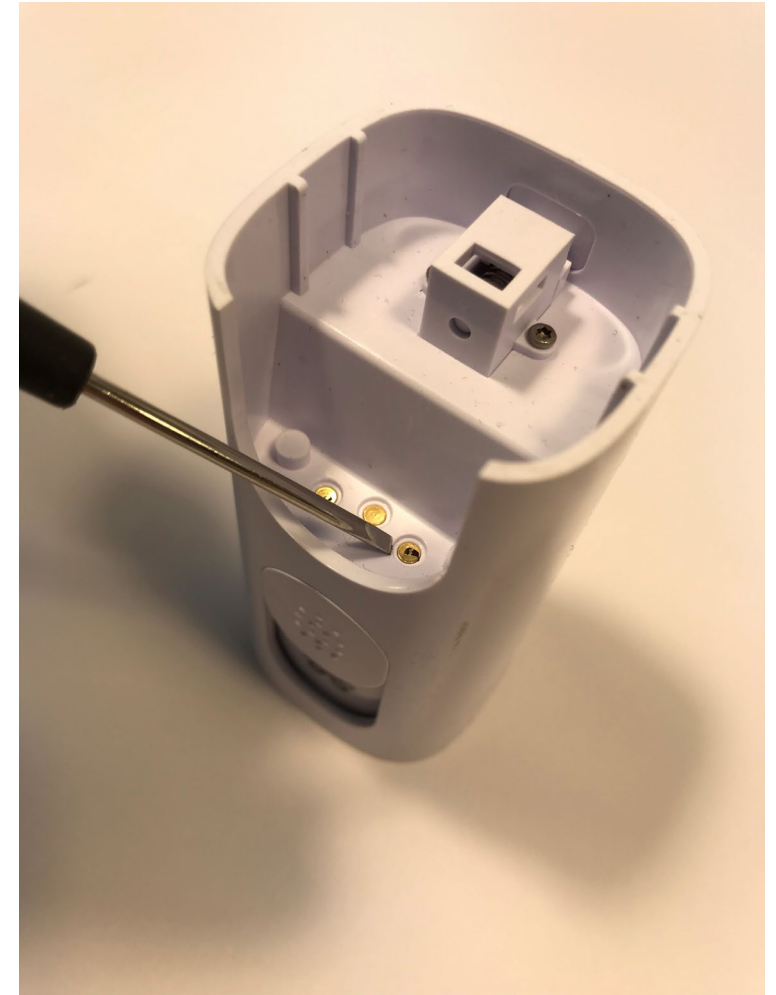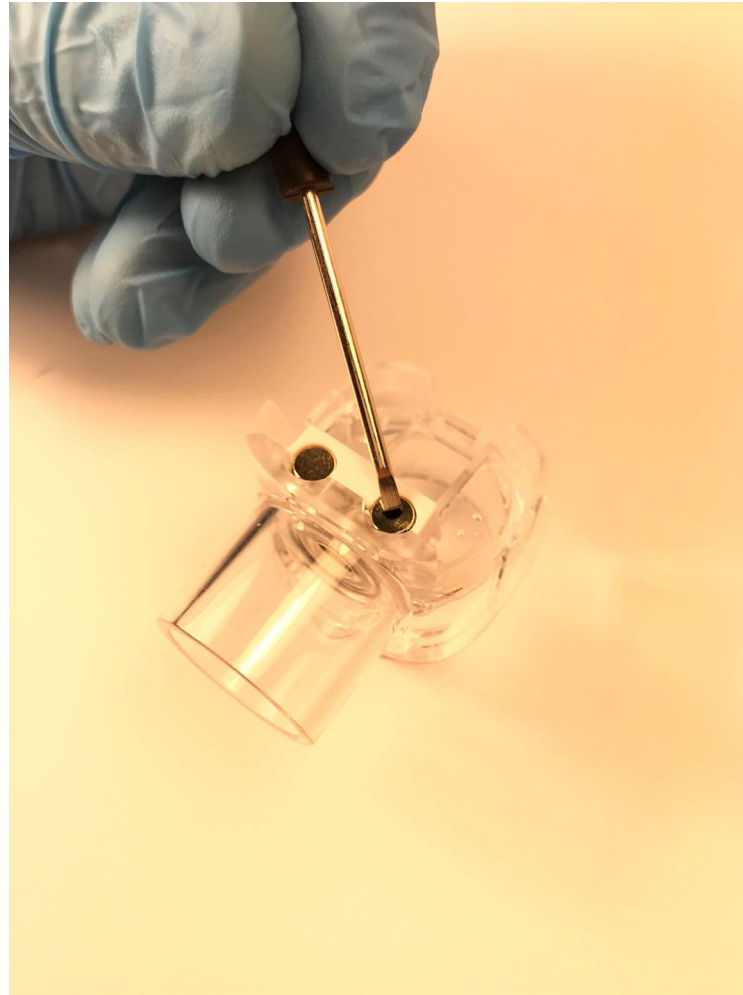

5

Sprawdź sprężystość pinów – pod niewielkim naciskiem placów powinny powracać do swojego pierwotnego położenia, jeśli nie - wykonaj procedurę czyszczenia z użyciem gazy nasączonej alkoholem wysokoprocentowym (spirytus).



6

Jeśli powyższe zabiegi nie przyniosły pożądanego efektu – zarejestruj zgłoszenie reklamacyjne, korzystając z linku napraw.nebulizator.info