

Nebulizator

Nebulizator AeroGo, nebulizator membranowy (siateczkowy)



Proces czyszczenia

Pamiętaj aby po każdym użyciu nebulizatora przeprowadzić proces czyszczenia urządzenia. W tym celu możesz przeprowadzić czyszczenie za pomocą roztworu wody z octem, zgodnie z poniższym schematem:



1. Odkręć pokrywkę od głowicę na lek



2. Do pojemnika na lek wlej 3-6 ml wody o temperaturze nie wyższej niż 40C



3. Dodaj 2-3 krople białego octu



4. Uruchom urządzenie i przeprowadź jeden cykl nebulizacyjny. Nie wdychaj rozpylanej mgiełki



Szybki



Cichy



Przenośny



Dodatkowa głowica



Mp3

Moduł mp3



Pobierz muzykę (w razie potrzeby pobierz aktualizację), urządzenie powinno wyświetlać się jako dysk zewnętrzny. **Pojemność** na przechowywanie danych w nebulizatorze to **8MB**.



Połącz urządzenie z komputerem za pomocą przewodu **Micro USB**.



Wybierz plik i wgraj/usuń pliki z rozszerzeniem **MP3 lub WMA**.



Odtwarzanie muzyki: w trakcie nebulizacji **wciśnij przycisk on/off** i przytrzymaj go do momentu uruchomienia plików dźwiękowych, pliki będą odtwarzane w sposób **ciągły**, ponowne wciśnięcie i przytrzymanie przycisku on/off zatrzyma odtwarzanie plików dźwiękowych.

Pobierz bajki na stronie healthin.com

Wszystkie NebuLiskowe bajeczki dostępne na

healthin.com



Masz jakieś pytania?

jesteśmy do Twojej dyspozycji

healthin.com

[healthin_com](https://www.instagram.com/healthin_com)

[/pullino](https://www.facebook.com/pullino)

kontakt@healthin.pl

[skontaktuj się z nami](#)

Specyfikacja Nebulizatora



Zasilanie DC 24 V (akumulator litowo-jonowy) lub DC 5.0 V z adapterem AC



Pobór mocy <4.0 W



Szybkość nebulizacji 0.15ml/min-0.9 ml/min



Wielkość cząsteczek MMAD <Sum



Częstotliwość pracy 130kHz + 10kHz



Pojemność pojemnika na lek 10ml



Wymiary i waga urządzenia 55mm(L)x40mm(W)x92mm(H)/1119



W nebulizatorze AeroGo **nie można** stosować substancji zawierających kwas hialuronowy, estry i oleje. Używanie takich produktów może spowodować **uszkodzenie membrany** urządzenia.

Weź głęboki oddech, bo każda chwila jest ważna!

