



Instrukcja diagnozy usterek w nebulizatorach siateczkowych


healthⁱⁿ

Nebulizatory sprzedawane za pośrednictwem naszego sklepu są wyrobami medycznymi.
Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją używania lub etykietą.

Jeśli zaobserwowałeś nieprawidłowe działanie swojego nebulizatora postępuj zgodnie z poniższymi krokami.

Z pozdrowieniami
Zespół healthin.com

Budowa nebulizatora

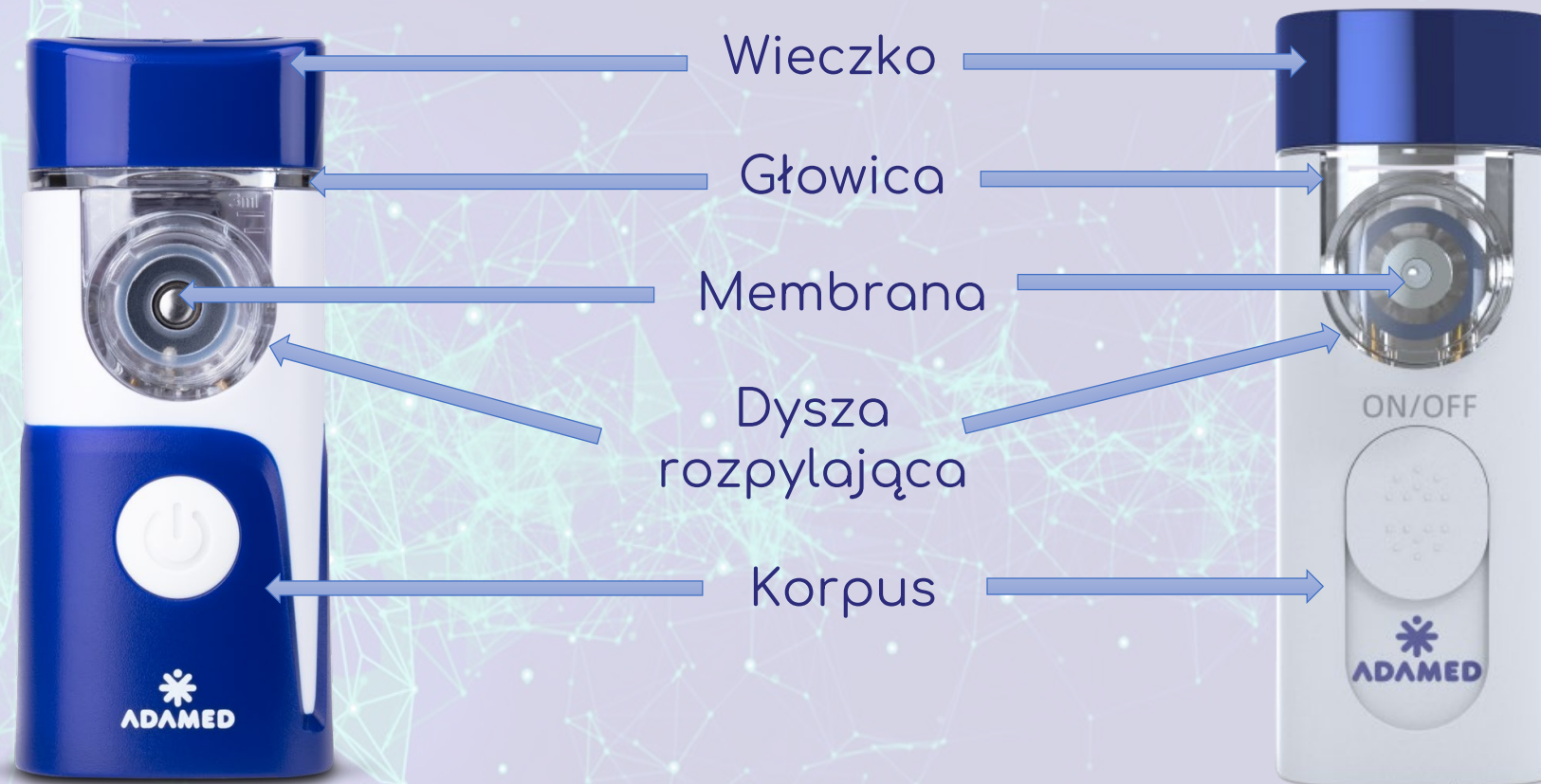

Przeprowadź wstępną diagnozę usterki przechodząc po kolei następujące kroki:




Upewnij się, że nebulizator jest w pełni naładowany (po podłączeniu przewodu zasilającego USB do adaptera sieciowego umieszczonego w gnieździe sieciowym, kontrolka „power” powinna świecić ciągłym światłem.




Przeprowadź poprawny proces czyszczenia membrany w głowicy rozpylającej według poniższej instrukcji:

1. Do pojemnika na lek wlej 3-6 ml wody (najlepiej przegotowanej o temperaturze nie wyższej niż 40°C);
2. Dodaj od 2-5 kropli białego octu (spirytusowego);
3. Zamknij pojemnik na lek i kilkakrotnie wstrząśnij urządzeniem z roztworem w pojemniku na lek (góra/dół oraz na boki);
4. Przeprowadź proces pełnej nebulizacji (nie wdychaj oparów wydobywających się z nebulizatora);
5. W celu dezynfekcji przetrzyj powierzchnię głowicy alkoholem 75% lub środkiem medycznego przeznaczenia. Do tej czynności użyj czystej gazy medycznej.



! Nie dotykaj metalowej membrany, gdyż grozi to uszkodzeniem mechanicznym!

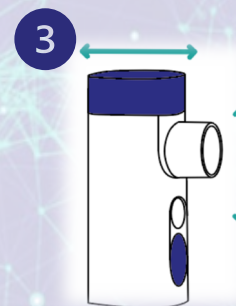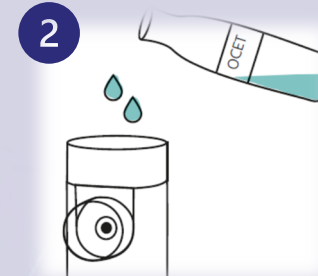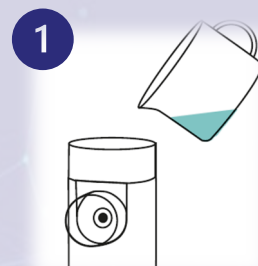

Sprawdź piny w nebulizatorze oraz głowicy rozpylającej, które powinny być czyste i wolne od wszelkich nalotów, aby utrzymać przewodzenie napięcia pomiędzy elementami nebulizatora.

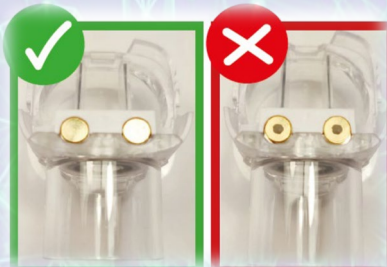


AirPro – 2 PINY

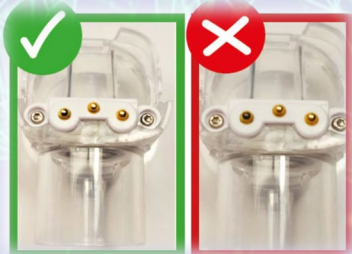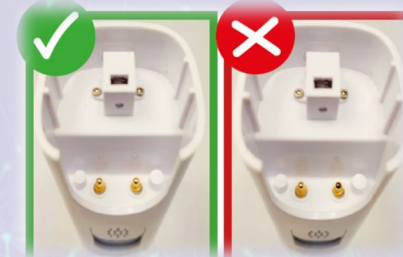


AirPro – 3 PINY
oraz AeroGo



Jeśli są zabrudzone – wykonaj procedurę czyszczenia z użyciem ostrego narzędzia, np.: niewielkich rozmiarów śrubokręta lub pilniczka do paznokci i gazy nasączonej alkoholem wysokoprocentowym (spirytus).

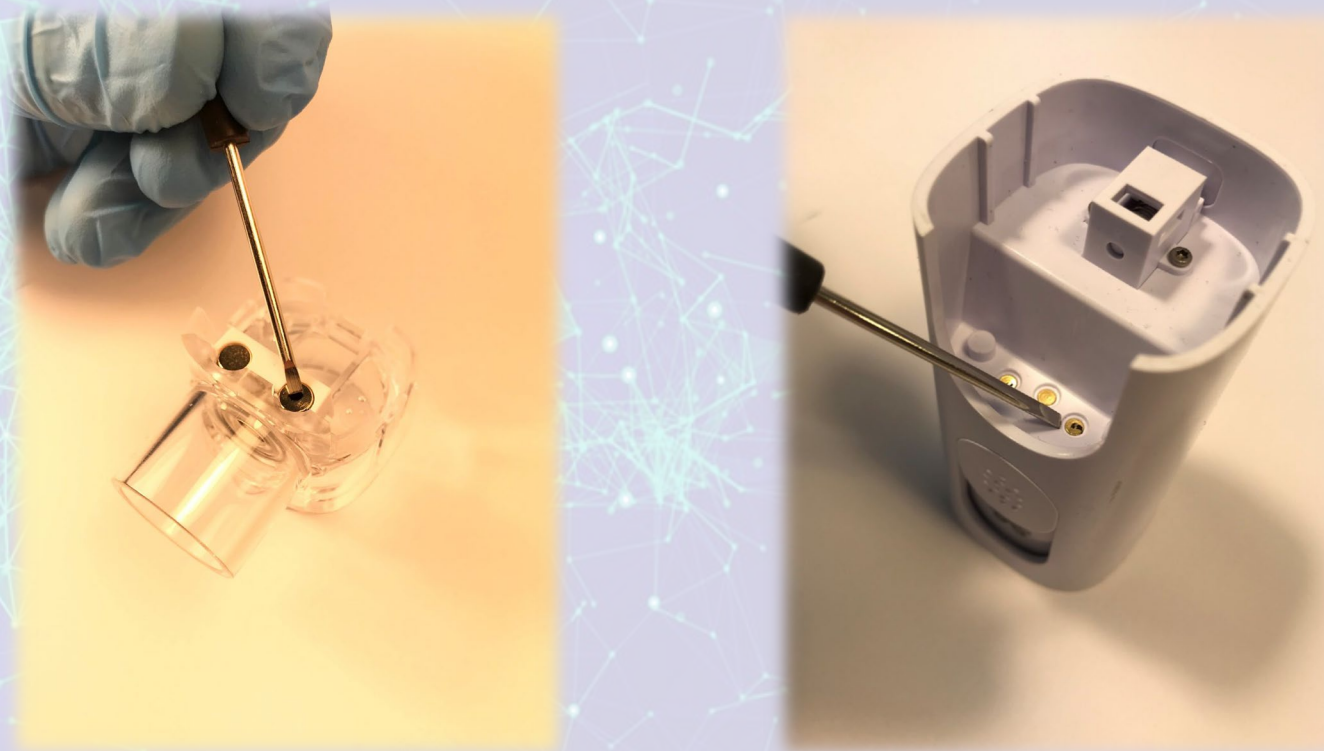

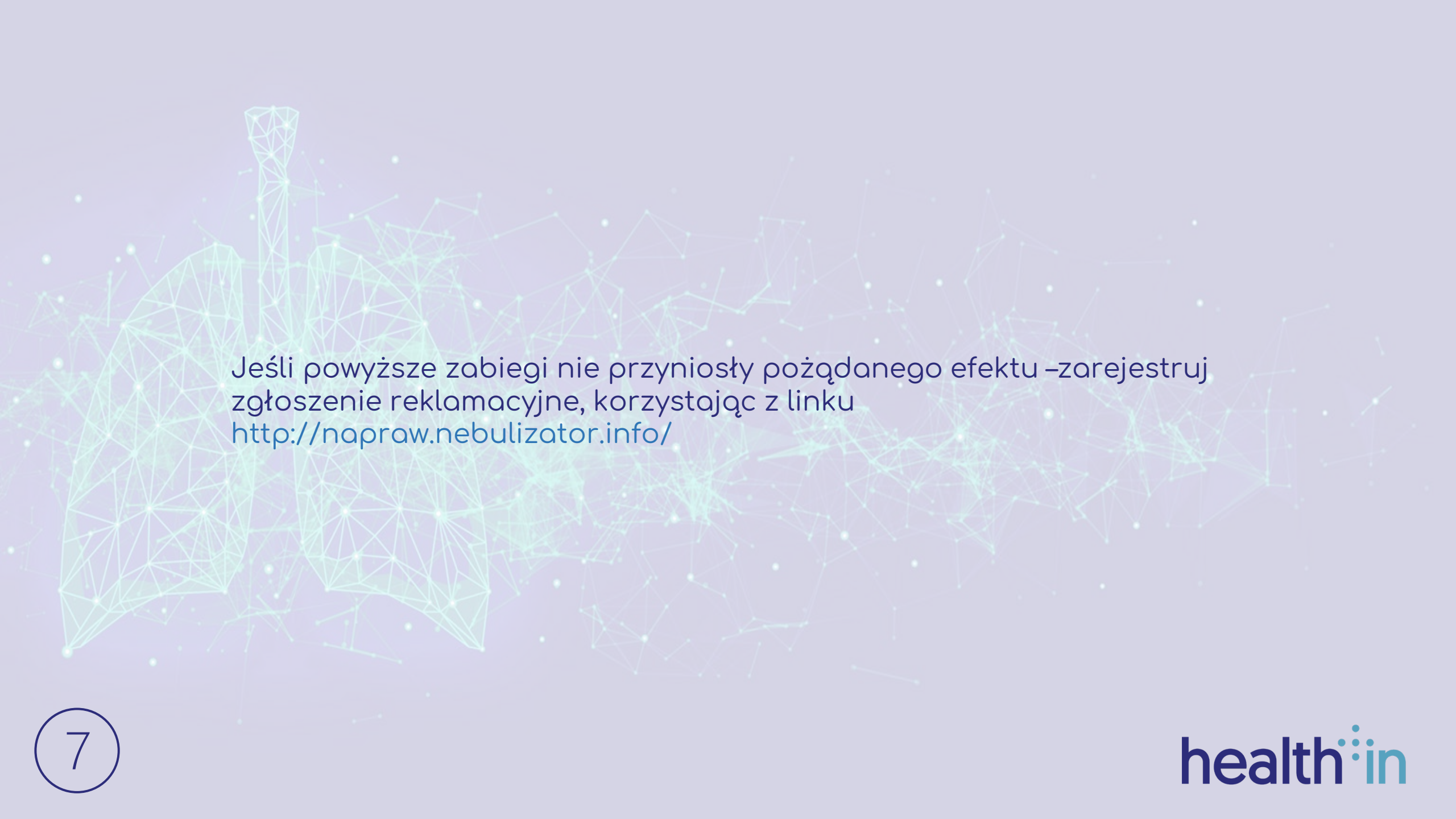

Jeśli powyższe zabiegi nie przyniosły pożądanego efektu –zarejestruj
zgłoszenie reklamacyjne, korzystając z linku
<http://napraw.nebulizator.info/>