


Instrukcja użytkowania

HooBee

Aspirator do nosa

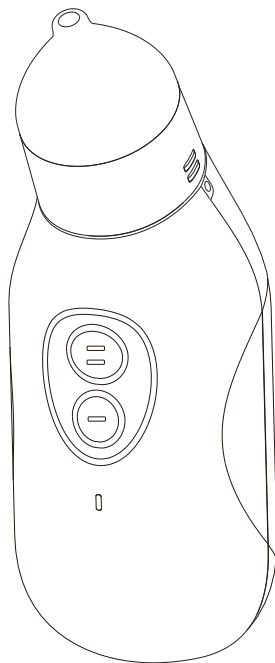

Należy dokładnie zapoznać się z instrukcją użytkowania aspiratora, zachować ją na przyszłość i przechowywać w miejscu dostępnym dla innych użytkowników.

Spis treści

Przeznaczenie aspiratora.....	2
Specyfikacja.....	2
Elementy zestawu.....	3
Opis urządzenia.....	3
Sposób użytkowania.....	3
Czyszczenie i dezynfekcja.....	4
Wersja z funkcją odtwarzania muzyki.....	5
Utylizacja.....	5
Rozwiązywanie problemów.....	5
Oznaczenia i symbole.....	6
Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa.....	6
Gwarancja.....	7

Drogi Użytkowniku,

Dziękujemy za zakup elektronicznego aspiratora do nosa HooBee.

Prosimy przechowywać instrukcję użytkowania w bezpiecznym miejscu, tak aby mieć do niej stały dostęp.

Informujemy, że ilustracje zawarte w instrukcji użytkowania mają charakter poglądowy. Instrukcja producenta ver.3.0. została przetłumaczona z oryginału instrukcji użytkowania na język polski za zgodą i wiedzą producenta. Tłumaczenie zostało w pełni zaakceptowane przez producenta.

Serdecznie pozdrawiamy,
Zespół Pulinfo

Przeznaczenie aspiratora

Aspirator do nosa HooBee jest przeznaczony wyłącznie do usuwania wydzieliny z nosa u dzieci. Nie należy stosować go w jamie ustnej, uchu lub innych otworach ciała; nie stosować u zwierząt. Dzieci powyżej 8. r.ż., osoby o obniżonej sprawności fizycznej lub umysłowej oraz osoby bez doświadczenia lub stosownej wiedzy mogą używać urządzenia w bezpiecznym środowisku pod nadzorem i ze świadomością istniejącego ryzyka. To urządzenie nie jest zabawką. Należy dopilnować, aby dzieci się nim nie bawiły. Czyszczenie i użytkowanie urządzenia przez dzieci możliwe jest wyłącznie pod nadzorem opiekuna.

Aspirator należy użytkować zgodnie ze wskazówkami zawartymi w Instrukcji użytkowania.

Przechowywać materiał opakowaniowy w miejscu niedostępnym dla dzieci (ryzyko uduszenia).

Aspirator do nosa HooBee przeznaczony jest wyłącznie do użytku w warunkach domowych, a nie do celów medycznych ani komercyjnych. Aspirator do nosa może być używany wyłącznie w celu, w jakim został zaprojektowany i w sposób określony w instrukcji użytkowania. Każda forma nieprawidłowego użytkowania może być niebezpieczna. Wytwórca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe wskutek nieprawidłowego lub niewłaściwego używania urządzenia. Nie wolno używać aspiratora do nosa, jeśli wystąpiło zdarzenie wskazane dalej w wymienionych ostrzeżeniach.

Specyfikacja

Nazwa i model	HooBee aspirator do nosa model VP-X1
Wymiary	142 x 42 x 56mm
Waga	około 137g bez baterii
Maksymalna moc ssania	70kPa
Poziom głośności	<50dB
Źródło zasilania	2 baterie alkaliczne AA 1,5V
Środowisko pracy	Temperatura: 10-40 °C Wilgotność względna: 30 do 85%RH Ciśnienie atmosferyczne: 70-106 kPa
Środowisko transportowania i przechowywania	Temperatura: od -20 do +50 °C Wilgotność względna: 30 do 85%Rh Ciśnienie atmosferyczne: 50-106 kPa

Parametry techniczne mogą ulec zmianie.

Numer seryjny jest umieszczony na urządzeniu lub na komorze baterii. Urządzenie nadaje się do użytku we wszystkich środowiskach wymienionych w Instrukcji użytkowania, w tym w warunkach domowych. Należy pamiętać, że przenośne i mobilne systemy komunikacji, bazujące na wysokiej częstotliwości HF, mogą zakłócać prace urządzenia.

Uwagi dotyczące zgodności elektromagnetycznej


- Urządzenie nadaje się do użytku we wszystkich środowiskach wymienionych w Instrukcji używania, w tym w warunkach domowych.
- Wystąpienie zaburzeń elektromagnetycznych może ograniczać możliwości korzystania z urządzenia i skutkować pojawianiem się komunikatów o błądach lub awarii wyświetlacza/urządzenia.
- Należy unikać korzystania z tego urządzenia w bezpośrednim pobliżu innych urządzeń lub stawiania go na innych urządzeniach, ponieważ może to prowadzić do wadliwego działania aspiratora; jeśli jednak konieczne jest korzystanie z urządzenia w taki sposób, należy baczenie monitorować prace obydwu urządzeń w celu upewnienia się, że działają prawidłowo.
- Używanie akcesoriów innych niż te, określone lub dostarczone przez wytwórcę urządzenia, może skutkować zwiększeniem emisji elektromagnetycznej lub zmniejszeniem odporności elektromagnetycznej urządzenia; może to prowadzić do wadliwego działania urządzenia.
- Brak przestrzegania powyższych wskazań może mieć niekorzystny wpływ na działanie urządzenia.

Należy upewnić się, że zewnętrzne opakowanie urządzenia jest w nienaruszonym stanie oraz sprawdzić, czy w opakowaniu znajdują się wszystkie elementy urządzenia i jego akcesoria.


Elementy zestawu

- 1 x aspirator do nosa
- 1 x szeroka silikonowa końcówka
- 1 x wąska silikonowa końcówka
- 2 x bateria alkaliczna AA 1,5 V
- 1 x butelka z zakraplaczem (element opcjonalny)
- 1 x woreczek do przechowywania (element opcjonalny)
- 1 x zbiorniczek na nieczystości (element opcjonalny)

Opis urządzenia

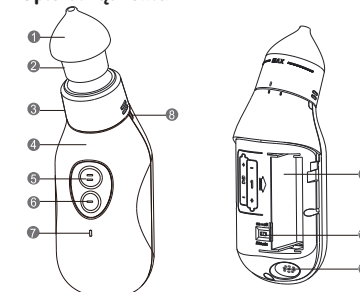

- 1 Silikonowa końcówka
- 2 Zbiorniczek na nieczystości
- 3 Obudowa ochronna pojemnika
- 4 Przednia obudowa
- 5 Przycisk drugiego biegu
- 6 Przycisk pierwszego biegu
- 7 Kontrolka zasilania
- 8 Otwory wentylacyjne
- 9 Komora baterii
- 10 Przełącznik odtwarzania muzyki (opcjonalny)

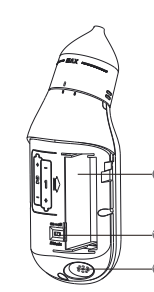


- 11 Ujście dźwięku
- 12 Pokrywa komory baterii

Sposób użytkowania

Pierwsze użycie

Wkładanie baterii

- W celu uruchomienia urządzenia należy włożyć do niego dołączone do zestawu baterie (2 x baterie alkaliczne AA 1,5 V).
1. Odsuń pokrywę komory baterii.
 2. Włóż obie baterie do komory baterii, ustawiając bieguny +/- zgodnie z oznakowaniem umieszczonym wewnątrz komory.
 3. Nasuwaj z powrotem pokrywę komory baterii do momentu aż kliknie, wskazując na swoje miejsce.

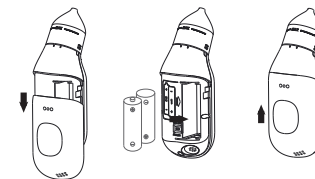

Użytkowanie

Rozpoczęcie procedury z zastosowaniem aspiratora do nosa:

1. Sprawdź, czy urządzenie działa prawidłowo i jest hermetyczne.
2. Podczas wykonywania aspiracji trzymaj dziecko w pozycji wyprostowanej lub lekko odchylonej. Nie używaj urządzenia gdy dziecko przebywa w pozycji leżącej.
3. W trakcie aspiracji trzymaj urządzenie pod kątem od 30 do 60° względem twarzy dziecka.



4. Aspirator do nosa działa wyłącznie gdy naciśnięty jest przycisk biegu pierwszego lub drugiego. Aby zakończyć działanie urządzenie zdejmij palec z przycisku biegu.
5. W przypadku gdy dziecko zaczyna odczuwać dyskomfort lub ból natychmiast zakończ aspirację.
6. Zakończ aspirację gdy zbiorniczek na wydzielinę z nosa napętni się do linii oznaczonej MAX.
7. Aby zakończyć korzystanie z urządzenia, zdejmij palec z przycisku biegu.
8. Oczyszcz urządzenie po każdym jego użyciu.

W zależności od potrzeb w zestawie znajdują się dwie różne silikonowe końcówki.



- Szeroka silikonowa końcówka odpowiednia do usuwania bardziej wodnistej wydzieliny z nosa.
- Wąska silikonowa końcówka odpowiednia do usuwania wydzieliny zalegającej głębiej w nosie.

Czyszczenie i dezynfekcja



Po każdym użyciu urządzenie należy wyczyścić, w przeciwnym wypadku może dojść do jego zatkania, co uniemożliwi sprawne i higieniczne działanie aspiratora.

1. Odłącz silikonową końcówkę i zbiorniczek na nieczystości od urządzenia (ściśnij silikonową końcówkę i wyciągnij ją z urządzenia razem ze zbiorniczkiem na nieczystości).




2. Oddziel od siebie silikonową końcówkę i zbiorniczek na nieczystości i dokładnie umyj każdą część z osobna.



3. Do oczyszczenia silikonowej końcówki i zbiorniczka na nieczystości używaj wody lub wody z dodatkiem łagodnego mydła (nie stosuj żrących środków czyszczących). Silikonowe końcówki możesz też oczyścić za pomocą gorącej wody. Umyte części umieść na suchym, czystym i chłodnym podłożu i pozostaw je do całkowitego wyschnięcia.

Silikonowe końcówki i zbiorniczek na nieczystości mogą być sterylizowane alkoholem.

4. Urządzenie główne czyścić wyłącznie czystą i suchą ściereczką. Nie używać żrących środków czyszczących, rozтворów ani benzenu. Urządzenia nie wolno zanurzać ani pukać w wodzie.

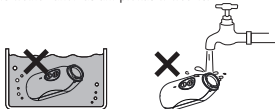


5. Osztud dokładnie wszystkie elementy miękką ściereczką. Przed ponownym złożeniem urządzenia upewnić się, że wszystkie jego części są całkowicie suche. Przechowywać urządzenie z dala od światła słonecznego, kurzu i wilgoci.

Wersja z funkcją odtwarzania muzyki

Przełącznik odtwarzania muzyki znajduje się wewnątrz tylnej pokrywy urządzenia. Naciśnij przełącznik w lewo, aby go włączyć, w prawo, aby go wyłączyć.

Jeśli przełącznik odtwarzania muzyki jest włączony, aspirator do nosa działa i odtwarzana jest muzyka; gdy urządzenie przestaje pracować, odtwarzanie muzyki ustaje. Jeśli przełącznik odtwarzania muzyki jest wyłączony niezależnie od tego czy urządzenie pracuje, czy nie - muzyka nie jest odtwarzana.

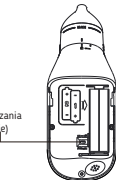

Przełącznik odtwarzania muzyki (opcjonalnie)

Utylizacja

Utylizacja urządzenia

W trosce o ochronę środowiska naturalnego, po zakończeniu eksploatacji urządzenia, nie należy wyrzucać go do odpadów gospodarstwa domowego. Urządzenie należy oddać do stosownego punktu odbioru elektrośmieci lub punktu recyklingu zgodnie z lokalnymi regulacjami w tym zakresie. W przypadku jakichkolwiek pytań należy skontaktować się z lokalnymi władzami lub organami odpowiedzialnymi za usuwanie odpadów.



Utylizacja baterii

Zużyte baterie muszą być wyrzucane do specjalnych pojemników przeznaczonych do zbioru zużytych baterii lub oddawane w punktach recyklingu albo do sklepów ze sprzętem elektronicznym. Obowiązuje prawny wymóg właściwej utylizacji baterii.

Rozwiązywanie problemów

Table with 3 columns: Problem, Możliwa przyczyna, Rozwiązanie. Rows include: Słaba moc ssańia lub brak mocy ssańia, Urządzenie nie odtwarza muzyki, Nie można odessać wydzieliny z nosa.

Oznaczenia i symbole

Przedstawione poniżej symbole występują w Instrukcji użytkowania oraz na urządzeniu:

Table with 2 columns: Symbol, Nazwa symbolu. Contains various safety and technical symbols like IP22, warning, CE, and battery icons.

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

! Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Przed pierwszym użyciem aspiratora należy upewnić się, że urządzenie i jego akcesoria nie noszą śladów żadnych, widocznych uszkodzeń. W razie jakichkolwiek wątpliwości nie należy używać urządzenia i skontaktować się ze sprzedawcą lub wskazanym punktem obsługi klienta.

- Jeśli u dziecka występuje schorzenie obejmujące jamę nosową, przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy skonsultować się z lekarzem.

Przechowywać materiał opakowaniowy z dala od dzieci (ryzyko uduszenia).

- W żadnym wypadku nie otwierać urządzenia, nie wprowadzać w nim żadnych modyfikacji ani samodzielnie go nie naprawiać; w przeciwnym wypadku nie ma gwarancji bezpiecznego działania urządzenia. Nieprzestrzeganie zaleceń zawartych w Instrukcji użytkownika wiąże się z ryzykiem wystąpienia niebezpieczeństwa oraz skutkuje unieważnieniem zapisów gwarancji.

! Ostrzeżenia

- Nie stosować u osób z krwawieniem z nosa.
- Nie stosować u osób z poważnymi urazami głowy, twarzy lub szyi.
- Nie stosować u osób z zaburzeniami krzepnięcia krwi lub chorobami krwi.
- Nie przykładać zbyt dużej siły przy wkładaniu silikonowej końcówki do nosa.
- Nie używać żadnych dodatkowych elementów, które nie są zalecane do stosowania przez wytwórcę.
- W żadnym wypadku nie wolno dopuścić do wnikięcia cieczy do wnętrza urządzenia.
- Trzymać z dala od promieni słonecznych.

Informacje dotyczące obsługi baterii

W przypadku wycieku elektrolitu z baterii należy nałożyć rękawice ochronne i oczyścić baterię. Jeśli elektrolit dostanie się do oczu lub wędzić w kontakt ze skórą, należy je przemyć wodą, a następnie skontaktować się z lekarzem.
- Ryzyko zadławienia! Dzieci mogą połknąć baterie i się nią zakrtusić. Baterie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Należy zwracać uwagę na oznakowanie polaryzacji baterii (+ i -).
- Chronić baterie przed nadmiernym przegrzaniem.
- Ryzyko wybuchu! Nie wrzucać baterii do ognia.
- Używać wyłącznie identycznych lub równoważnych typów baterii.
- Zawsze wymieniać wszystkie baterie w tym samym czasie.
- Nie używać baterii wielokrotnego ładowania.
- Nie rozmontowywać, nie otwierać ani nie zginać baterii.
- Zużyte baterie należy wyjąć z urządzenia i bezpiecznie zutylizować.
- Nie doprowadzać do zwarcia zacisków zasilania baterii.
- W urządzeniu tym nie wolno stosować baterii wielokrotnego ładowania!
- Jeśli baterie się wyczerpały lub jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego baterie, zapobiegnie to uszkodzeniu urządzenia, spowodowanemu możliwym wyciekami elektrolitu z baterii.

Gwarancja

- 1. Firma Pulinno sp. z o.o. (zwana dalej Gwarantem) z siedzibą w Pabianicach udziela gwarancji co do jakości urządzenia.
2. Gwarant zapewnia w ramach udzielonej gwarancji, że urządzenie jest wolne od wszelkich wad fizycznych i prawnych.
3. Okres gwarancji na urządzenie główne wynosi 24 miesiące od daty sprzedaży.
4. Zasięg terytorialny ochrony gwarancyjnej: Rzeczpospolita Polska
5. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w urządzeniu.
6. Gwarancją nie są objęte:
a) Części ulegające naturalnemu zużyciu,
b) Uszkodzenia mechaniczne, termiczne i chemiczne sprzętu spowodowane przez użytkownika,
c) Uszkodzenia i wady wynikłe na skutek:
- Niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, konserwacji lub przechowywania,
- Niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją użytkowania instalacji.

- Używania materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów innych niż zalecane przez producenta i Gwaranta.
- Samowolnych, dokonywanych przez użytkownika lub inne osoby napraw, przeróbek i zmian konstrukcyjnych.
- Działania siły wyższej (powódź, pożar, uderzenie pioruna itp.).
d) Usterki spowodowane niewłaściwym czyszczeniem lub zaniechaniem tej czynności.
7. Gwarancja udzielona na urządzenie wygasa w przypadku:
a) Dokonania przez nieuprawnione podmioty (w szczególności przez nieuprawniony serwis bądź samego nabywcę), jakichkolwiek napraw, przeróbek, modyfikacji lub zmian w konstrukcji sprzętu.
b) Stwierdzenie uszkodzenia plomb, etykiety lub innych zabezpieczeń, bądź ich zamazanie uniemożliwiające odczytanie zawartych w nich informacji, może być potraktowane jako próba ingerencji w urządzenie nieuprawnionego podmiotu i jako takie skutkować wygaśnięciem gwarancji.
8. Zgłoszenia reklamacji urządzenia z tytułu udzielonej na niego gwarancji można dokonać bezpośrednio u Gwaranta.
9. Gwarant organizuje transport i odbiera urządzenie od Kupujących.
10. Gwarant zapewnia bezpłatne usunięcie wady w terminie 14 dni od daty dostarczenia wadliwego wyrobu medycznego do serwisu Gwaranta.
11. O sposobie rozpatrzenia reklamacji (naprawa, wymiana urządzenia na nowe) decyduje Gwarant.
12. W przypadku wymiany sprzętu lub jego części na nowe, przechodzą one w posiadanie pacjenta/ klienta, natomiast wadliwy wyrób medyczny lub jego części wymienione w trakcie naprawy przechodzą w posiadanie Gwaranta.
13. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w Instrukcji użytkowania, do wykonania, których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt (np. wymiana materiałów eksploatacyjnych, czyszczenie itp.).
14. Sprzęt oddawany do naprawy musi być kompletny (tzn. zawierając wszystkie elementy oryginalne znajdujące się w zestawie). Do naprawy przyjmowany jest sprzęt oczyszczony z płynów, czysty i suchy. Gwarant zastrzega sobie prawo obciążenia użytkownika kosztami doprowadzenia wyrobu medycznego do stanu spełniającego wymogi przyjęcia do serwisu.
15. Wraz ze sprzętem w ramach reklamacji należy składać: dowód zakupu w postaci paragonu lub faktury, czytelny i dokładny opis usterki czego dotyczy, dane użytkownika: imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub e-mail - wszystkie informacje znajdują się na stronie healthin.com/reklamacje/
16. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o niezgodności rzeczy sprzedanej z umową.

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkownika.

Importer: Pulinno sp. z o.o. ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5 95-200 Pabianice www.pulinno.com e-mail: office@pulinno.com

Serwis techniczny: Pulinno sp. z o.o. ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5 95-200 Pabianice tel.: +48 572 155 100 e-mail: serwis@pulinno.com



Share Info GmbH Heerdter Lothweg 83,40549 Düsseldorf

Vapo Healthcare Co., Ltd. Southern unit of third floor, building B, No. 99 Yudai West Rd, High Tech District, KunShan, Suzhou, Prowincja Jiangsu, Chiny Wyprodukowano w Chinach

Aktualne informacje na temat aspiratora HooBee są dostępne na healthin.com

