

Wyrób medyczny

Stuffy

ASPIRATOR KATARU STUFFY

Zastosowanie:

Aspirator kataru to bezpieczne urządzenie służące do odciągania wydzieliny z nosa u niemowląt, dzieci i dorosłych. Został zaprojektowany tak, aby każdy jego użytkownik mógł go samodzielnie złożyć i rozłożyć oraz wyczyścić, przepłukując aspirator pod bieżącą wodą. Po wysuszeniu aspirator powinien być przechowywany w specjalnie przeznaczonym do tego opakowaniu.



W przypadku stosowania u dzieci i niemowląt bądź u osób o ograniczonych zdolnościach umysłowych aspirator powinien być użytkowany wyłącznie przez osoby dorosłe. Aspirator należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Aspirator należy podłączyć umieszczając niebieską wkładkę w rurę ssącą odkurzacza. Odpowiednie ukształtowanie aspiratora redukuje siłę ssącą z odkurzacza na bezpieczne, a poprzez regulację tej siły umożliwia zmianę ciśnienia powietrza ssącego między komorami, dzięki czemu w prosty sposób można je dostosować do potrzeb użytkownika. Przed użyciem sprawdzić czy działa z odkurzaczem, czy siła nie jest zbyt duża. Urządzenie zostało wykonane z bezpiecznego, wytrzymałego i atestowanego tworzywa najwyższej jakości.

Przeznaczenie medyczne:

1. Dzieci 0+ (od 1 dnia życia)
2. Osoby z uciążliwym problemem zalegającej wydzieliny w nosie (osoby dorosłe i starsze wymagające opieki)

Wskazania:


1. Katar infekcyjny (wirusowy i bakteryjny)
2. Katar alergiczny
3. Sezonowy nieżyt nosa

Przeciwwskazania:

1. Uszkodzona błona śluzowa nosa
2. Obrzęk błony śluzowej nosa
3. Krwawienie z nos

Budowa urządzenia:

Aspirator kataru Stuffy składa się z ośmiu części: komory I, komory II, komory III, komory VI, końcówki I, końcówki II, wężyka oraz wkładki do odkurzacza. Ponadto posiada dodatkową końcówkę oraz nakładkę silikonową. Wszystkie elementy znajdują się w dedykowanym do przechowywania i transportu pudełku zabezpieczającym.

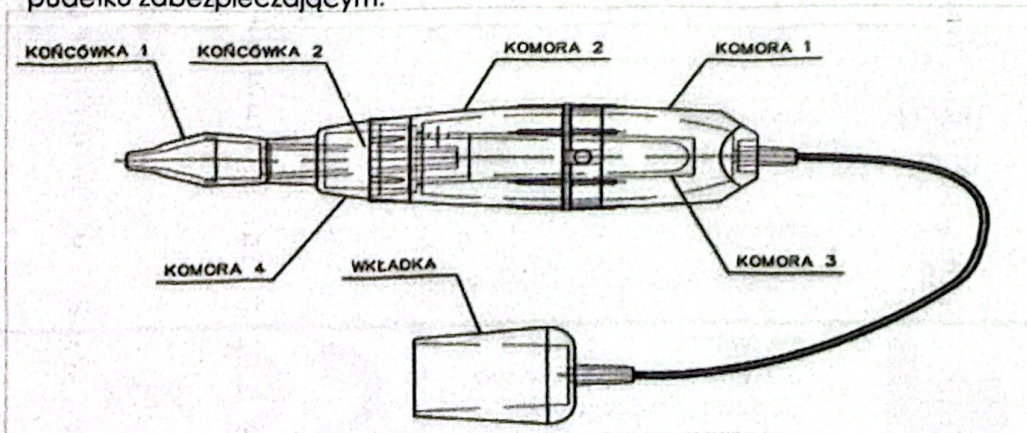

Rys. 1 Budowa aspiratora

Utrzymanie w czystości:

Aspirator kataru STUFFY jest produkowany ze specjalnego materiału, który pozwala na utrzymanie produktu w czystości. Po każdym zabiegu rozłoż aspirator zgodnie ze schematem i w zależności od potrzeby wypłucz dokładnie wodą. W przypadku silnych zabrudzeń może być konieczne zastosowanie środków czyszczących przeznaczonych do stosowania u dzieci i niemowląt. Aspirator należy przechowywać w opakowaniu do tego przeznaczonym, wcześniej go osuszając.



Produkt należy umyć po każdym zabiegu. Produktu nie należy sterylizować ani gotować w wodzie, grozi to uszkodzeniem materiału, z którego wykonany jest aspirator.

Nie stosować środków dezynfekujących.

Nie wkładać do kuchenki mikrofalowej.

Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Przed użyciem zweryfikuj czy wyrób nie nosi śladów uszkodzenia, takich jak: pęknięcia, nieszczelności, jeżeli występują nie korzystaj z wyrobu.

Sposób użycia:

1. Połącz ze sobą elementy aspiratora według schematu z rysunku nr 1
2. Połącz wkładkę niebieską z rurą ssącą do odkurzacza domowego.



Aspirator nie może być podłączany do odkurzaczy innych niż domowe oraz nie posiadających węża ssącego. Stosowany Odkurzacz musi być sprawny i należy go podłączać do gniazdka z uziemieniem zabezpieczającym bądź innego odpowiadającego lokalnym przepisom prawa !

Uruchom odkurzacz. W zależności od potrzeb i oczekiwanej sily ssącej, użyj regulatora znajdującego się na aspiratorze pomiędzy komorami I a II. Zmianę uzyskuje się poprzez przekręcenie ich względem siebie w celu zwiększenia / zmniejszenia pola powierzchni otworu.

3. Przyłóż końcówkę aspiratora do przedsionka nosa (niewskazane jest penetrowanie komory nosa) i odciągaj katar z każdej przegrody nosowej przez czas nie dłuższy niż 5-10 s.
4. W przypadku nie odciągnięcia wszystkiej wydzieliny ponów proces odsysania.
5. Po zabiegu rozłóż aspirator zgodnie ze schematem i postępuj zgodnie z punktem - Utrzymanie w czystości.
6. Nie zastosowanie się do powyższych wytycznych może powodować negatywne skutki ze względu na możliwość zalegania we wnętrzu aspiratora bakterii i wirusów, oraz spowodować zanieczyszczenie mechaniczne wyrobu.



W przypadku gdy w trakcie używania wyrobu wystąpi krwawienie z nosa zaprzestać użytkowania i zgłosić się do lekarza.

Symbole użyte w instrukcji obsługi oraz na oznakowaniu:

	Wytwórca
	Uwaga
	Przeczytaj w instrukcji obsługi
	Numer partii
	Wyrób medyczny
	Okres ważności
	Oznaczenie zgodności z Dyrektywą



Wytwórca:
JO-VITAL Jowita Wietecha
ul. Spacerowiczów 49
30-444 Libertów

